



neofect

twohandsinteractive
PLAY THE FUTURE



play-didim.com

Neofect Germany GmbH
+49 89 59081302 | info@neofect.de
Marcel-Breuer-Str 15, 80807 München, Deutschland

www.neofect.de/smart-playground/

DIE AUGMENTED REALITY WORKOUT PLATTFORM

DIDIM

Gebrauchsanweisung

V 1.0

SMART PLAYGROUND
DIDIM™



FÜR IHRE SICHERHEIT UND IHREN KOMFORT

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Alle Systeme, Programme und die darin enthaltenen Inhalte von DIDIM sind durch ihre
jeweiligen Patente und Copyrights geschützt.

Urheberrecht 2024 Twohands Interactive. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

VOR NUTZUNG	01 Über die Gebrauchsanweisung-----	S3
	02 Garantie -----	S3
SICHERHEITSHINWEIS	03 Sicherheitshinweis -----	S4
ERSTER AUFBAU	04 Platzierung und Spielfläche-----	S5
	05 Kiosk Setup -----	S7
	06 Starten und Herunterfahren -----	S8
INHALTE	07 Schnittstellenlayout-----	S9
	08 Bedienung der Schnittstelle-----	S10
	09 Inhalte -----	S11
	- Training / Gehirn/ Spiel -----	S12
	10 Training Support Programme-----	S13
	- Zirkel Training-----	S13
	- Thema Training -----	S13
	- Netzwerk Multiplayer -----	S13
	- Archiv -----	S14
	- Körperlicher Test -----	S14
	- Workout Bericht -----	S14
	11 Updates -----	S15
	12 Zusätzliche Inhalte (SHOP) -----	S16
EINFACHES SETUP	13 System Einstellungen -----	S17
	- Ticker -----	S18
	- Bildschirmschoner -----	S18
	- Fußschnittstelle -----	S18
	- Updates -----	S19
	- Benutzerhandbuch -----	S19
	14 Mobile Steuerung -----	S20
	15 KIOSK Einstellungen -----	S21
	16 Inhalt auswählen -----	S22
	17 Multi-Kiosk Setup -----	S23
TROUBLESHOOTING	18 Häufig gemeldete Probleme -----	S25
	- Die Sensoren verstehen -----	S26
	19 Online Support -----	S27
	20 Spezifikationen -----	S28

01 ÜBER DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für den sicheren und einfachen Betrieb des Smart Playgrounds (DIDIM).*

Dieses Handbuch ist sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form erhältlich. Das gedruckte Exemplar liegt der Lieferung des Kiosks bei, und eine digitale Kopie kann über die offizielle Website von Neofect erworben oder direkt am Kiosk (dem Gerät) eingesehen werden.

*Da ständig Aktualisierungen und Verbesserungen vorgenommen werden, kann sich der Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung ändern.

02 GARANTIE

Für den Smart Playground Kiosk gilt eine Garantie von 1 Jahr. Sollten innerhalb dieses Zeitraums technische Probleme auftreten, wird Ihr Produkt kostenlos gewartet.*

***Der Service kann Ihnen in Rechnung gestellt werden, wenn:**

- [1] die Garantiezeit abgelaufen ist;
- [2] nicht autorisierte Änderungen, Reparaturen oder andere Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung verursacht wurden, festgestellt werden;
- [3] der integrierte PC nicht zugelassene Anwendungen wie z. B. Videospiele enthält;
- [4] das Gerät durch eine Naturkatastrophe beschädigt/zerstört wurde;
- [5] der installierte Bereich ein hohes Maß an statischer Elektrizität aufweist;
- [6] das Verbrauchsmaterial abgelaufen ist;
- [7] die schriftlichen Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgt wurden;
- [8] oder die Projektorlampe nach 90 Tagen oder mehr ab dem Kaufdatum ausfällt.

03 SICHERHEITSHINWEIS



FALLGEFAHR

► DER KIOSK KANN HERUNTERFALLEN UND VERLETZUNGEN VERURSACHEN

- [1] Der Kiosk ist 163 cm (5 ft 4 in) hoch und 54 kg (119 lbs) schwer, was bei einem Sturz zu bei einem Sturz schwere Verletzungen verursachen kann.
- [2] Wir empfehlen daher, die Verankerungspunkte an der Bodenplatte zu verwenden, wenn der Kiosk an einem Ort installiert wird, der eine solche Gefahr darstellt.
- [3] Wenn Sie das Produkt ohne Verankerung verwenden möchten, weisen Sie die Benutzer darauf hin, sich nicht auf das Gerät zu stützen oder zu hängen.



HITZEGEFAHR


► ACHTEN SIE AUF DIE PROJEKTORENTLÜFTUNG

- [1] Auf der rechten Seite des Kiosks (mit Blick auf den Bildschirm) befindet sich eine Lüftungsöffnung für den Projektor.
- [2] Diese Lüftungsöffnung kann die Außenhülle des Kiosks während des Betriebs erhitzen.
- [3] Obwohl dies keine kritische Gefahr darstellt, ist es wichtig, dies als normales Verhalten anzuerkennen.

Um die beste Erfahrung zu machen, muss das Gerät wie folgt installiert werden:

► SINGLE SYSTEM

Bis zu 6 Spieler können ein Gerät gleichzeitig benutzen.

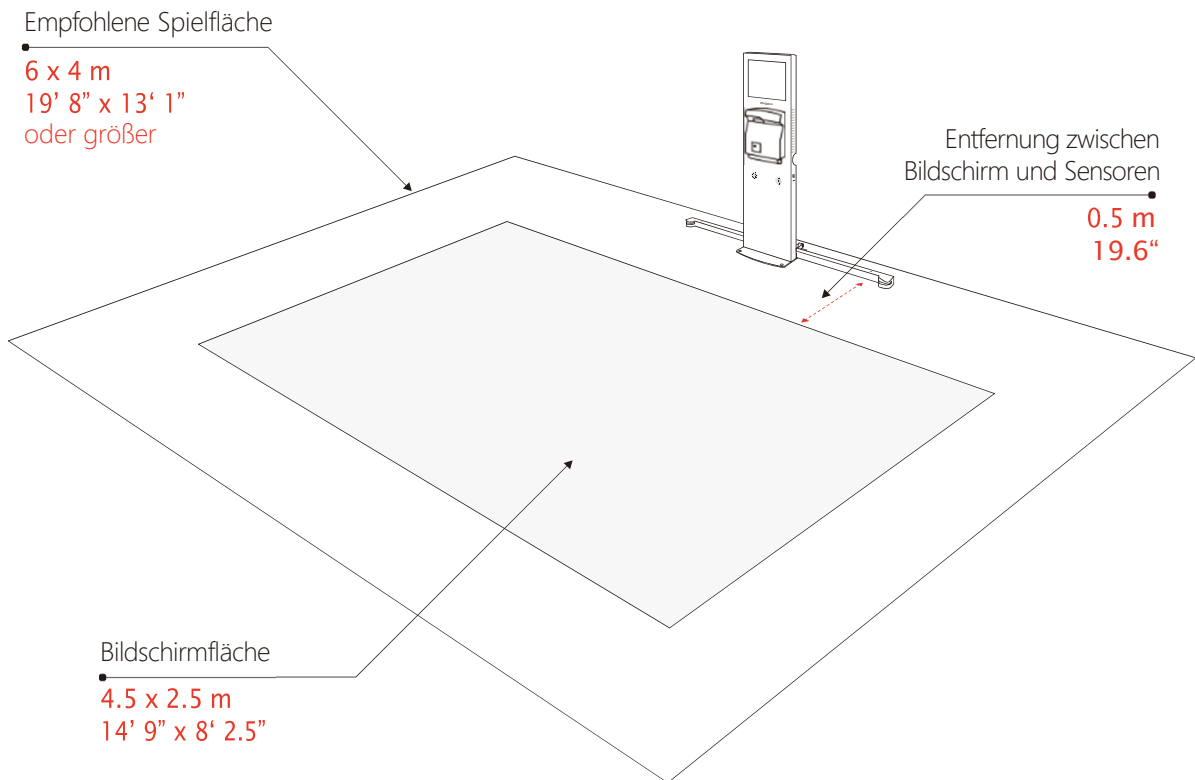


! EMPFOHLENES UMFELD

► BODEN

- [A] Der Boden muss eben sein.
- [B] Der Boden muss in einer hellen Farbe und ohne Muster sein.
- [C] Falls erforderlich, empfehlen wir die Verwendung einer Spielmatte.

► MEHRERE SYSTEME

Zwei Smart Playground-Kioske können nebeneinander aufgestellt und synchron betrieben werden. So entsteht ein Spielbereich, an dem bis zu 12 Spieler teilnehmen können.

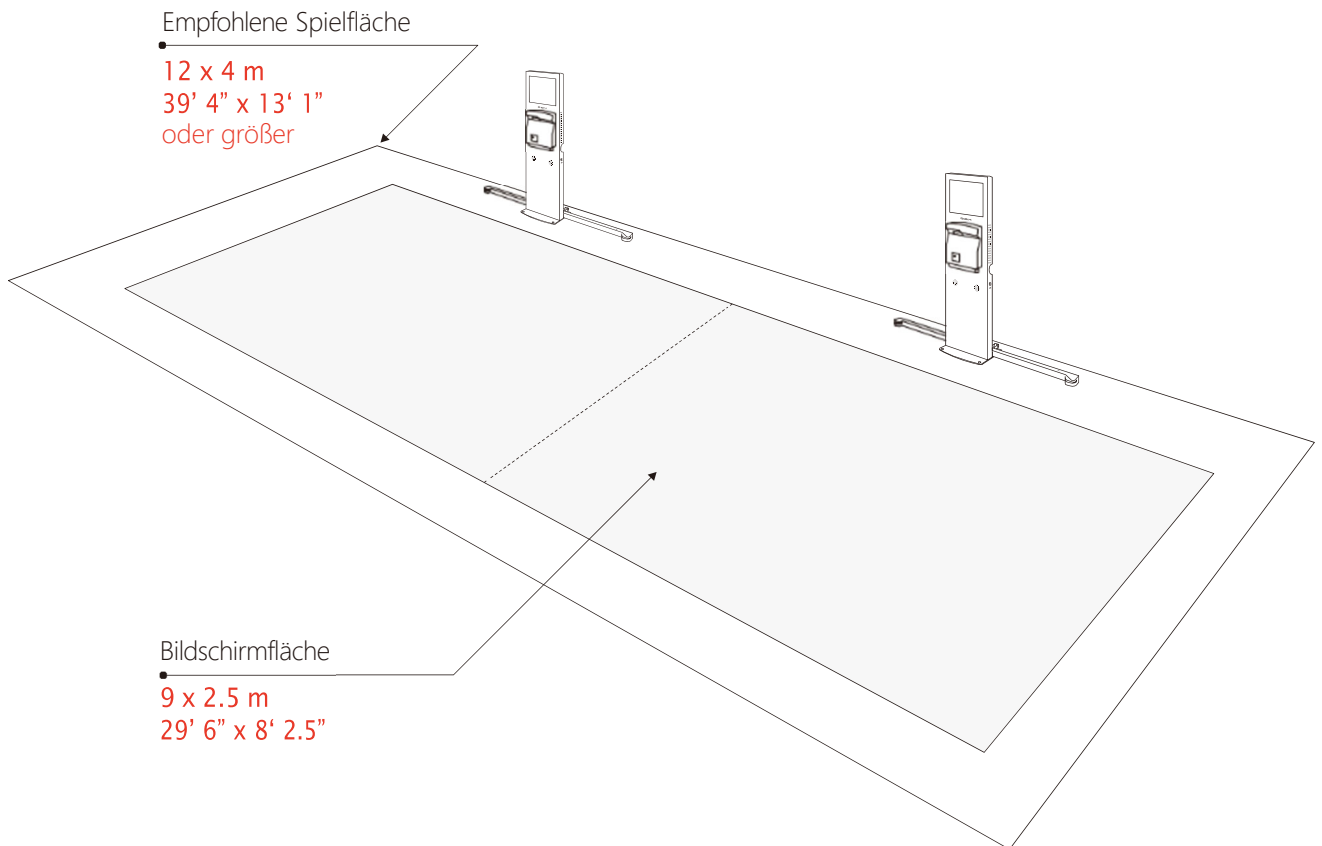

► INTERNET VERBINDUNG


Für die Einrichtung mehrerer Systeme ist eine Internetverbindung erforderlich. Für eine bessere Stabilität sollten Sie eine Kabelverbindung verwenden.

► LICHT

Um die Immersion zu verbessern, sollten Sie die Lichtverhältnisse im Spielbereich verringern (weniger als 50 Lux empfohlen).

05 KIOSK SETUP


Diese Smart Playground-Basiskonfiguration enthält alles Notwendige in einem einzigen, tragbaren Paket.

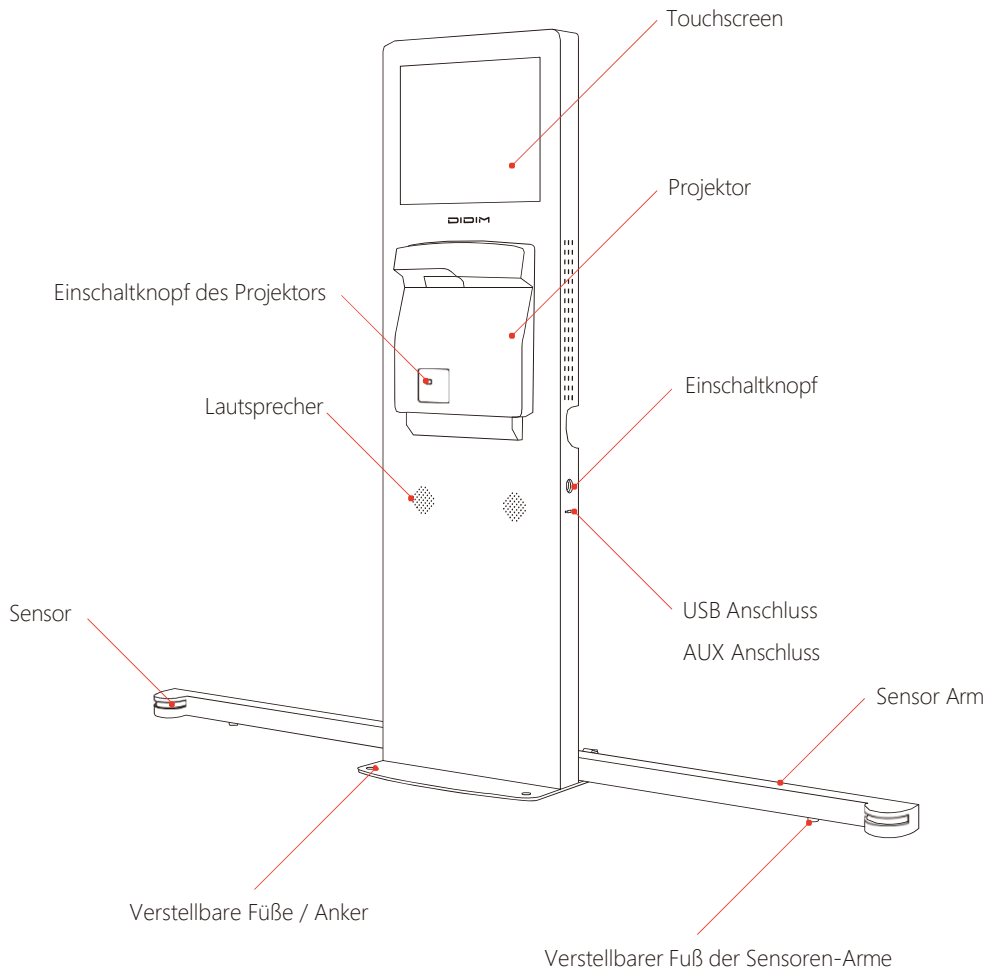


Inhalt	DIDIM Kiosk	Staub Schutz	Projektor Fernbedienung	Kiosk Schlüssel	Benutzerhandbuch
Check					

06 STARTEN UND HERUNTERFAHREN


Das Gerät muss auf folgende Weise ein- und ausgeschaltet werden.

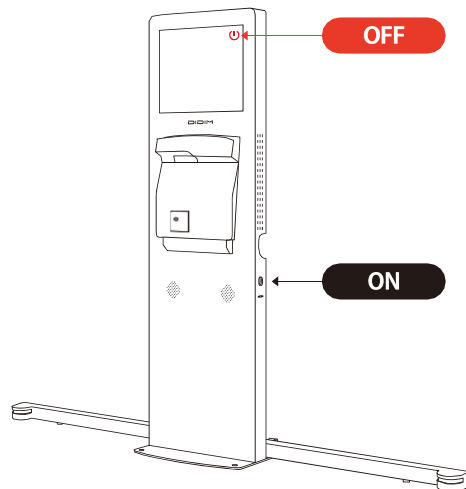

EINSCHALTEN

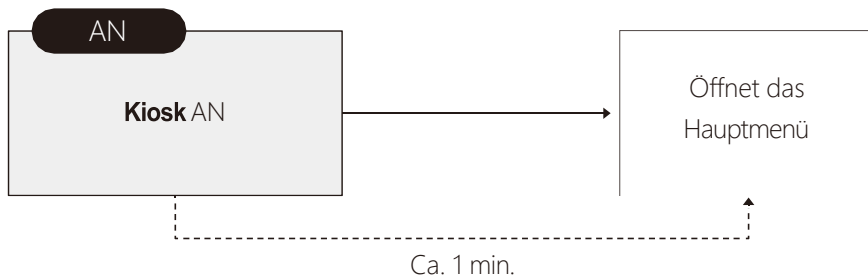

HERUNTERFAHREN

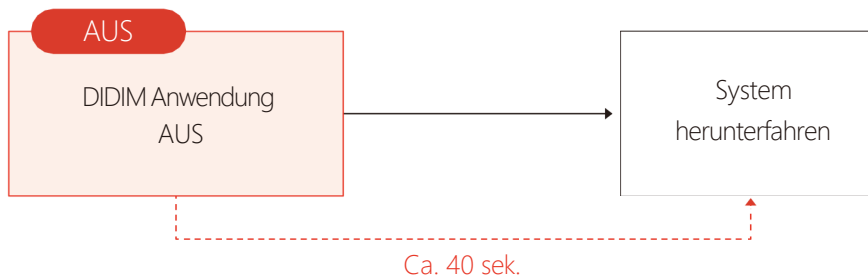


- ▶ Der Lüfter des Projektors kann auch nach dem Ausschalten des KIOSK laufen.
- ▶ Zur Kühlung der Lampe schaltet er sich nach etwa 3 Minuten automatisch ab.
Bitte warten Sie einen Moment.

07 SCHNITTSTELLENLAYOUT

DIDIM enthält eine Reihe von Funktionen, die Ihr Training effektiv unterstützen.

► HAUPTMENÜ

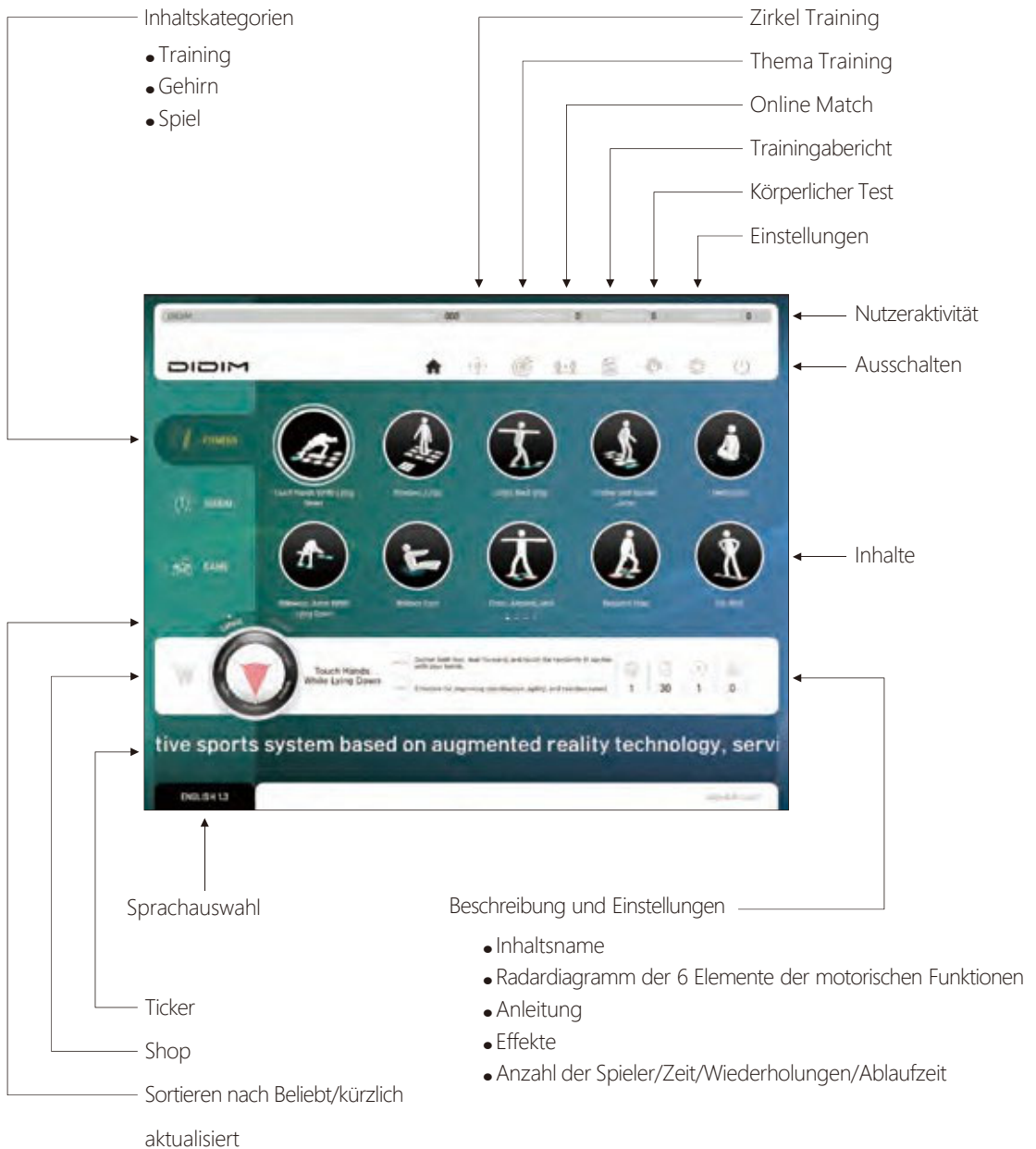

08 BEDIENUNG DER SCHNITTSTELLE

DIDIM kann über den Touchscreen, die mobile App oder die Fußsteuerung bedient werden.




► KIOSK TOUCHSCREEN



► MOBILE APP

* Die Maschine kann über Ihr Telefon oder Tablet gesteuert werden. -> p20 Mobile Steuerung

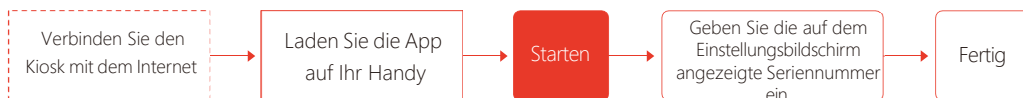


► FUßSCHNITTSTELLE

* Sobald die Fußschnittstelle in den Einstellungen aktiviert ist, können Sie das Interface mit der Berührung mit den Füßen auf dem Bodenbildschirm bedienen. -> p18 Fußschalter

09 INHALTE

DIDIM unterstützt die körperliche, intellektuelle und emotionale Entwicklung und ist eine dreifache Lösung in einem Paket, das drei Kategorien von Inhalten bietet.

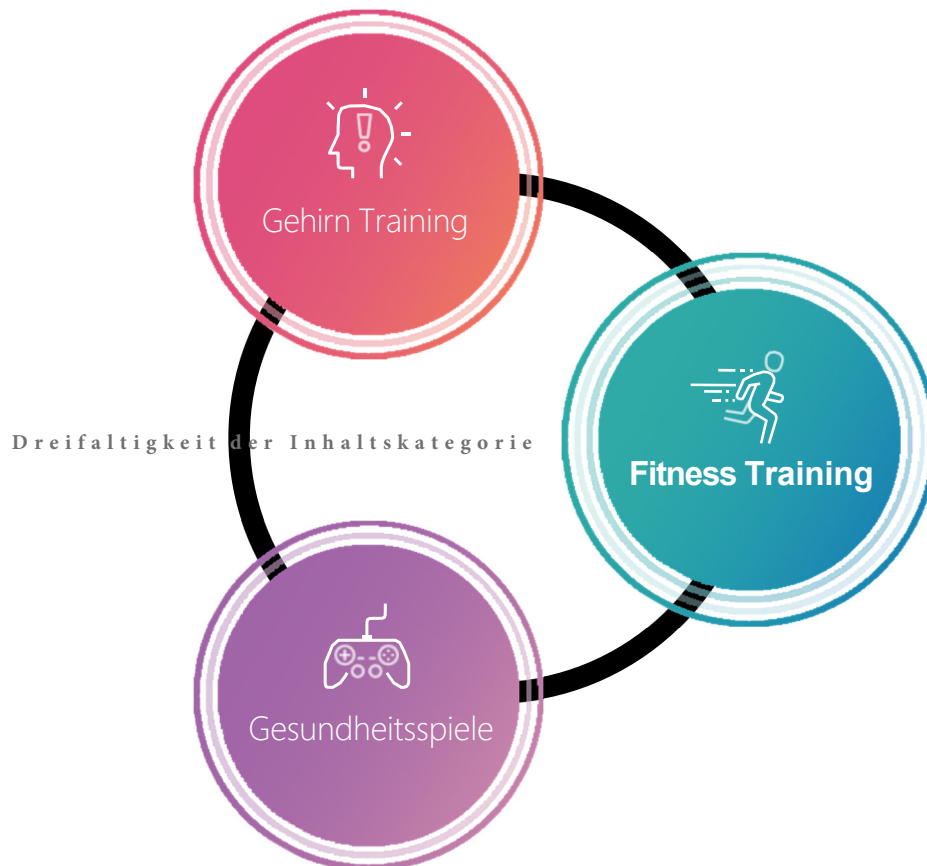

Das DIDIM bietet über 80 verschiedene Aktivitäten für alle Altersgruppen an.

► Es werden regelmäßig neue Inhalte entwickelt und bereitgestellt. Diese neuen Ergänzungen sind auf der Shop-Seite zu finden, sobald das Gerät aktualisiert wurde.



► FITNESS TRAINING

Mit präzisen Messungen des Energieverbrauchs und zuverlässigen Aufzeichnungen kann diese Kategorie von Aktivitäten für die Fitness nützlich sein, unabhängig davon, ob Sie allein oder mit einem speziellen Trainer trainieren.



► GEHIRN TRAINING

Diese Kategorie umfasst vor allem Gedächtnis-, Mathematik-, Reflex- und Erkennungsaktivitäten und kann zur Entwicklung oder Aufrechterhaltung der Gehirnfunktionen beitragen.




► GESUNDHEITSSPIELE

Diese spielerischen Aktivitäten können Jugendlichen die Freude an der Bewegung, am Wettbewerb und an der Zusammenarbeit vermitteln und ihre Kontaktfreudigkeit fördern.

10 TRAINING SUPPORT PROGRAMM

Das Training Support Programm wurde als umfassende, detaillierte Lösung entwickelt, die Sie bei Ihrem Training unterstützen kann.

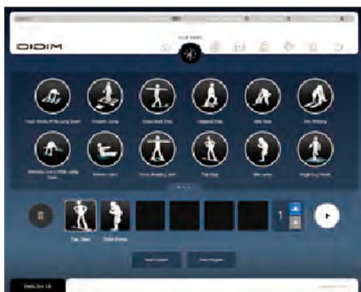


► ZIRKEL TRAINING

Wählen Sie bis zu sechs Aktivitäten aus und kombinieren Sie sie zu einem Programm, um personalisierte Trainingskurse zu erstellen. Auf die gespeicherten Programme können Sie über Thema Training.



► THEMA TRAINING

In diesem Bereich finden Sie ein Archiv mit Trainingsprogrammen, die von professionellen Trainern entwickelt wurden, und eine Reihe von thematischen Programmen, die Sie in Ihren Alltag integrieren können. Von hier aus können Sie auch auf Ihre gespeicherten Programme zugreifen.

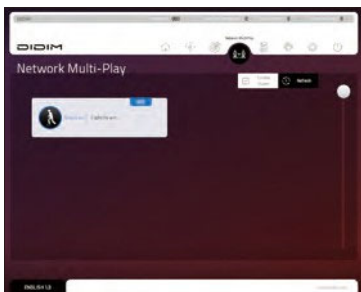

► NETZWERK MULTIPLAYER

Verbinden Sie sich mit anderen Spielern online und konkurrieren oder kooperieren Sie in Echtzeit.

Kommt mit einer globalen Anzeigetafel.

Diese Funktionen werden in Zusammenarbeit mit Trainern entwickelt, um zuverlässige Daten zu liefern.



► WORKOUT ARCHIV

Dieses Archiv, in dem die aktive Zeit, die zurückgelegte Strecke und die verbrauchte Energie jedes Benutzers erfasst werden, kann als leistungsfähiges Werkzeug für langfristige Trainingspläne dienen. Sie müssen mindestens einen Benutzer registrieren, um diese Funktion nutzen zu können.



► KÖRPERLICHER TEST

Physikalisches Testsystem, mit dem sich die sechs grundlegenden Trainingsfähigkeiten - kardiorespiratorische Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit, Flexibilität, Gleichgewicht, Muskelkraft und muskuläre Ausdauer - leicht messen und verwalten lassen, z. B. Pendellauf und Standweitsprung.

*Dies ist eine experimentelle Funktion und wird derzeit in Zusammenarbeit mit Universitätskliniken entwickelt.



► TRAININGSBERICHT

Dieser leicht zu lesende infografische Bericht analysiert und bewertet die Fähigkeiten eines Nutzers auf der Grundlage der von ihm gewählten Aktivitäten und seiner körperlichen Merkmale. Dieser Bericht kann über eine USB-Verbindung ausgedruckt werden.

11 UPDATES

Um die Benutzerfreundlichkeit durch Verbesserungen und Ergänzungen zu verbessern, wird das System regelmäßig aktualisiert.

Es gibt zwei Arten von Updates, "System" und "Inhalt", **und beide erfordern eine Internetverbindung, um heruntergeladen zu werden.**

► SYSTEM UPDATE



Die Basisfunktionen wie Multiplayer, Übungsbericht und Ticker werden in den meisten Fällen kostenlos aktualisiert.

-

System-Updates werden jedes Jahr im Januar und Juli veröffentlicht. Wir empfehlen daher, Ihren Rechner mindestens zweimal im Jahr mit dem Internet zu verbinden, um diese Updates zu erhalten.

► INHALTS UPDATE



Neu veröffentlichte Aktivitäten in den Bereichen Fitnesstraining, Gehirntraining und Gesundheitsspiele werden als kostenpflichtige Zusatzinhalte angeboten.



-

Diese Inhalte können zum vollen Preis, mit Rabatt oder kostenlos über bestimmte Events bezogen werden. Zwei neue Inhalte werden regelmäßig jedes Jahr kostenlos freigeschaltet.



-

Sie können die neuen Inhalte auf der Shop-Seite überprüfen und kaufen.

12 ZUSÄTZLICHE INHALTE (SHOP)

Alle zusätzlichen Inhalte können über den integrierten Shop erworben werden. Diese Funktion erfordert eine Internetverbindung, um zu funktionieren.

► SHOP

Der Shop kann über das Hauptmenü aufgerufen werden.



► SPIELPROBE

Die Gegenstände im Shop können dreimal am Tag zur Probe gespielt werden. Dies wird jeden Tag zurückgesetzt.

► EINKAUF


Die Zahlung kann nur mit Kreditkarte erfolgen und wird über eine externe Abrechnungsstelle abgewickelt.


Sobald Ihre Zahlung bestätigt wurde, wird der Artikel automatisch installiert.

13 SYSTEM EINSTELLUNGEN

Das DIDIM bietet eine Reihe von anpassbaren Funktionen, die sich am besten an die Bedürfnisse des Benutzers oder an die Betriebsumgebung anpassen lassen.

► EINSTELLUNGSLAYOUT

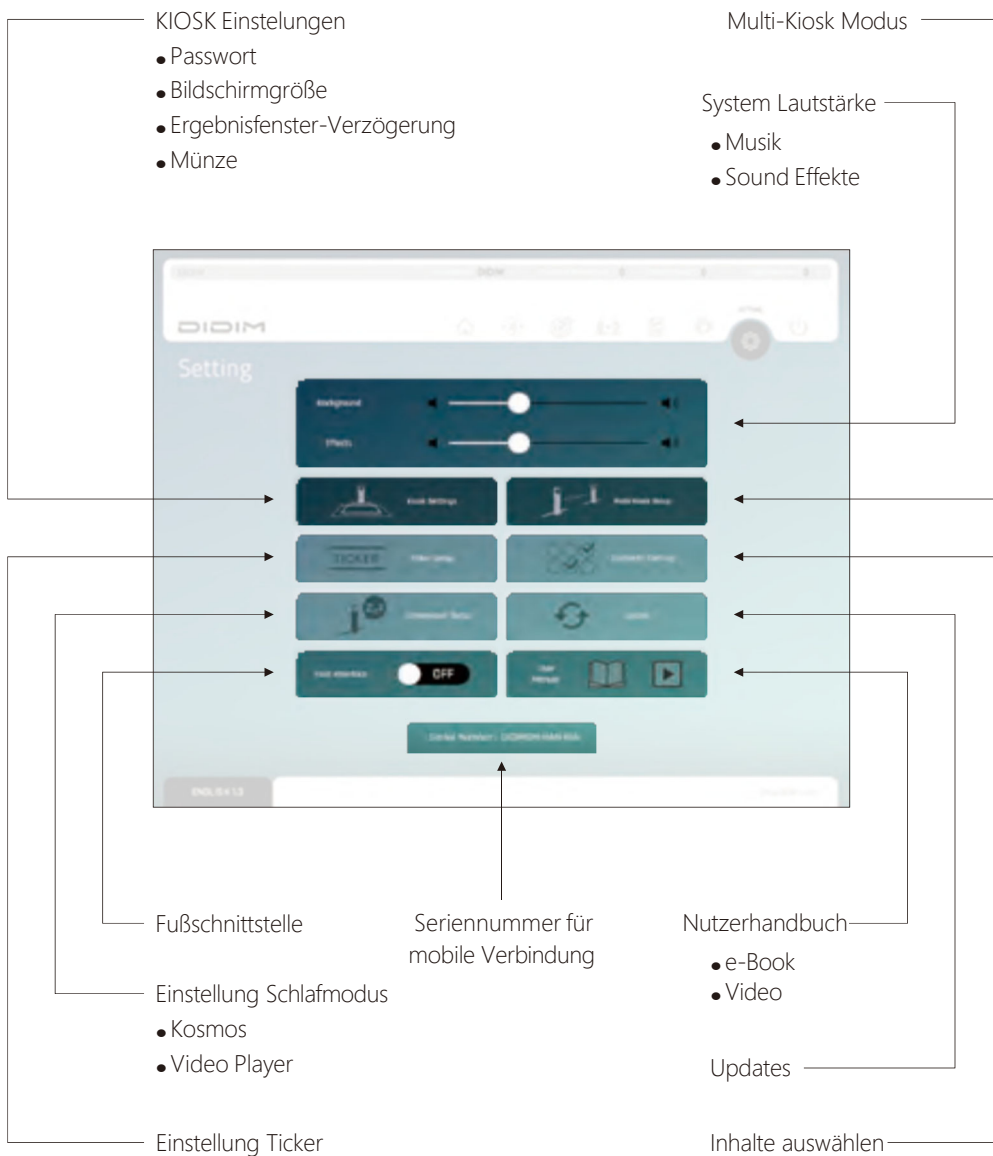


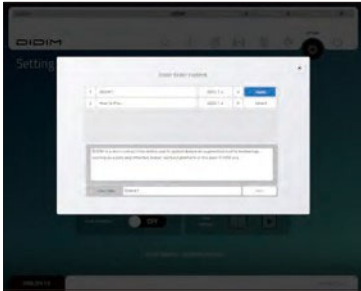

► TICKER

TICKER

Ticker ist eine Anzeigetafel, die eine fortlaufende Textnachricht auf dem Hauptbildschirm anzeigt. Der Administrator kann diese Meldungen schreiben und verwalten. Das anfängliche Kennwort ist auf 0000 eingestellt.


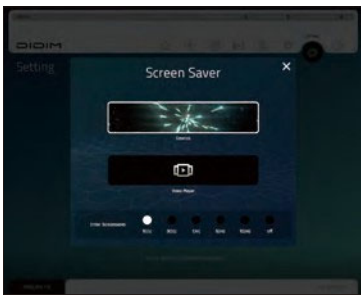


► BILDSCHIRMSCHONER



Wenn das System eine bestimmte Zeit lang keine Eingaben erhalten hat, geht es in diesen Modus über, um Energie zu sparen.

- Kosmos: Ein leerlaufender Bildschirm des Weltraums, der einen Knalleffekt erzeugt, wenn Schritte erkannt werden
- Video-Player: Gibt ein Video wieder, das auf einem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert ist.

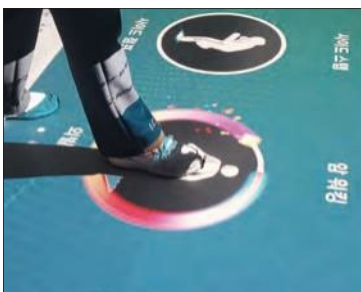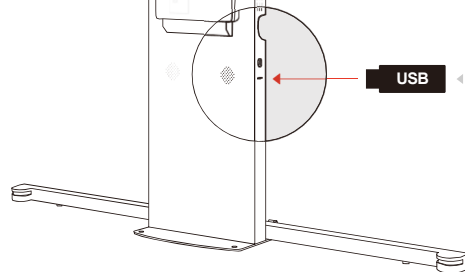

► FUßSCHNITTSTELLE



Mit dieser Funktion kann der Bodenbildschirm für die Navigation auf der Benutzeroberfläche verwendet werden.

Um Fehleingaben zu vermeiden, sind die meisten Bedienelemente mit einer 3-Sekunden-Verzögerung eingestellt.

13 SYSTEMEINSTELLUNGEN


Das DIDIM bietet eine Reihe von anpassbaren Funktionen, die sich am besten an die Bedürfnisse des Benutzers oder an die Betriebsumgebung anpassen lassen.



► UPDATES

Überprüfen Sie die Version Ihres Systems und laden Sie alle verfügbaren Updates herunter.

*Internetverbindung erforderlich

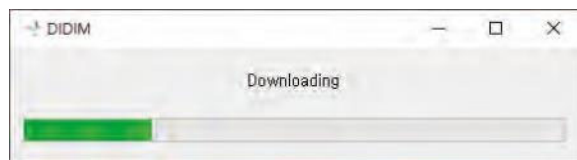

► NUTZERHANDBUCH

Für eine sichere und einfache Bedienung des DIDIM stellen wir drei verschiedene Formate von Bedienungsanleitungen zur Verfügung, einschließlich eines gedruckten Exemplars, das dem Gerät beiliegt.


- eBook
Am Kiosk sofort verfügbar.
- Video
Insbesondere der Ein- und Ausschaltvorgang wird zum besseren Verständnis in einem Video gezeigt.
- PDF-Dokument
Eine Original-PDF-Kopie des Handbuchs ist auf der offiziellen Website von DIDIM verfügbar.
www.play-didim.com



14 MOBILE STEUERUNG

Das DIDIM muss mit dem Internet verbunden sein, um das mobile Steuergerät verwenden zu können.

► 1. DOWNLOAD DER APP

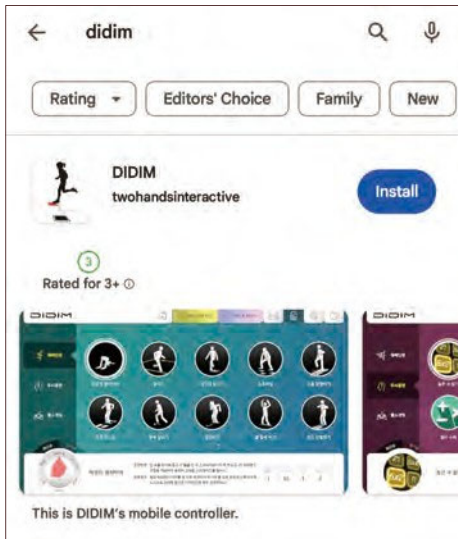

Laden Sie die DIDIM-Controller-App aus dem Google Play Store herunter.

* Die Versionsnummer des DIDIM-Clients muss mit der der Controller-App übereinstimmen.

► 2. EINGABE DER SERIENNUMMER



Sobald die Anwendung gestartet ist, geben Sie die Seriennummer Ihres DIDIM Kiosk ein.

* Die Seriennummer finden Sie am unteren Rand des Einstellungsbildschirms auf Ihrem Kiosk.


-> 13. System-Einstellungen

► 3. VERBINDEN

Wenn Sie die Seriennummer korrekt eingegeben haben, wird die Anwendung für kurze Zeit geladen und mit Ihrem DIDIM Kiosk verbunden.


* Wenn der Vorgang fehlschlägt, überprüfen Sie die Internetverbindung des Kiosks und stellen Sie sicher, dass sowohl der Kiosk als auch Ihre mobile Controller-Anwendung die gleiche Versionsnummer aufweisen.

Stellen Sie die Grundfunktionen des Kiosks ein, um das System entsprechend der Nutzungsumgebung zu optimieren, z. B. das Passwort im Einstellungsfenster festzulegen und die Bildschirmgröße anzupassen.

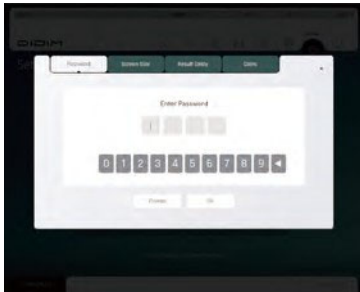


► Passwort

Um zu verhindern, dass die Systemeinstellungen willkürlich geändert werden, können Sie im Einstellungsfenster selbst ein Passwort festlegen.

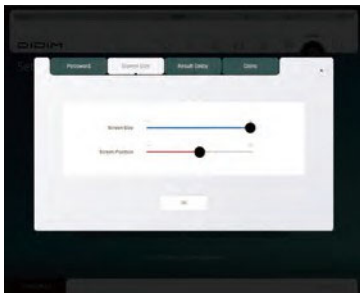

► Bildschirmgröße

Bei der Auslieferung des Produkts ist Didim auf die größte Leinwand mit einer Breite von 4,5 m eingestellt. Wenn Sie den Bildschirm verkleinern müssen, um ihn an den Installationsort anzupassen, können Sie ihn mit dieser Funktion frei einstellen.

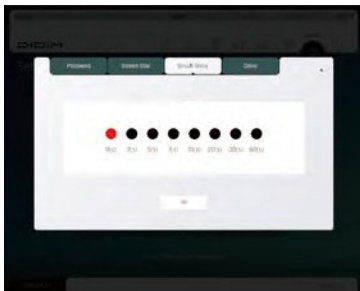

► Ergebnisfenster-Verzögerung

Bei der Wiedergabe von Inhalten können Sie die Belichtungszeit des Pop-up-Fensters, in dem die Wiedergabeergebnisse angezeigt werden, anpassen.



► Münze


Für den kommerziellen Betrieb in Kaufhäusern, Hotels, Spielhallen usw. kann das DIDIM mit einem separaten Münzeinwurf ausgestattet werden. Sie können die Spielmethode und den Schwierigkeitsgrad je nach den eingesetzten Münzen einstellen.

16 INHALTE AUSWÄHLEN

Ursprüngliches Passwort: 0000

Der Inhalt kann zu 100 % an die Merkmale des Benutzers oder der Einrichtung, in der er installiert ist, angepasst werden, z. B. Schule, Sporthalle, Wissenschaftsmuseum, Mathematikcamp oder Seniorenheim.

[Wie man wählt]

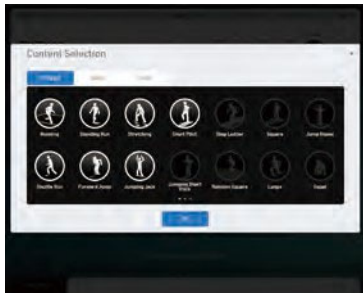

1 Inhalte auswählen

Wählen Sie aus dem Inhaltsauswahlfenster für jede der drei Kategorien - körperliches Training, Gehirntraining und Gesundheitsspiele - die Inhalte aus, die Sie anpassen möchten.




2 Inhalte überprüfen

Stellen Sie sicher, dass nur der auf dem Hauptbildschirm ausgewählte Inhalt angezeigt wird.

17 MULTI-KIOSK EINSTELLUNGEN

Mit der Multi-Kiosk-Funktion können zwei Geräte miteinander verbunden werden, die dann wie ein einziges funktionieren und mehr Spielern die Teilnahme an einem größeren Raum ermöglichen.

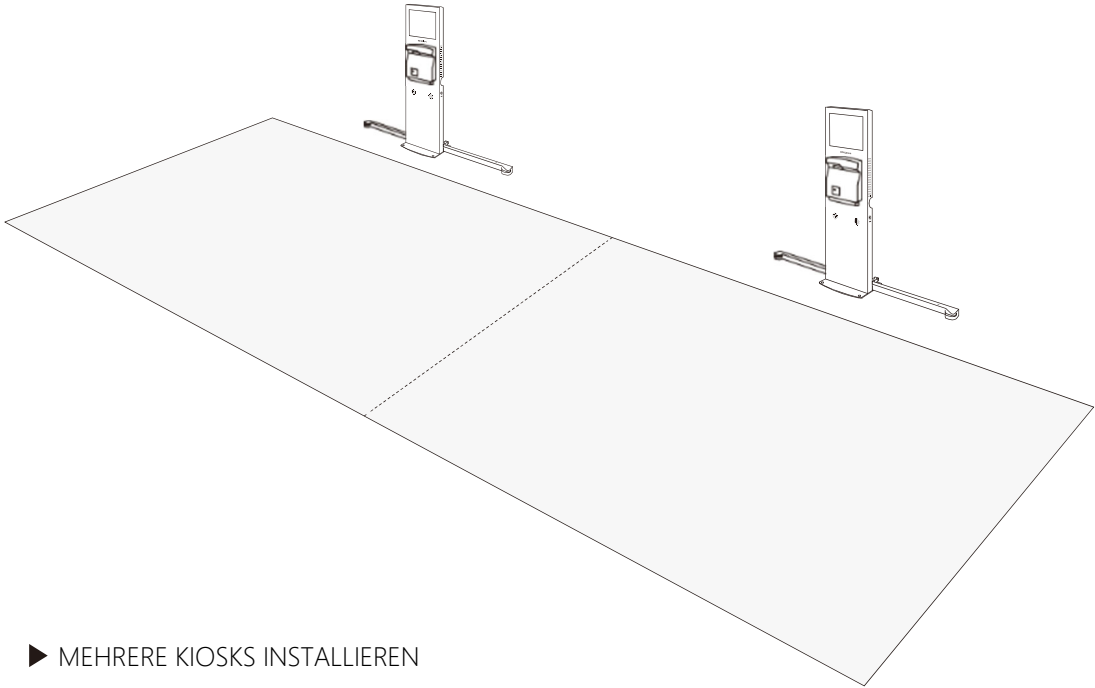

► MEHRERE KIOSKS INSTALLIEREN

- [1] Stellen Sie zwei Kioske nebeneinander auf.
- [2] Starten Sie beide Kioske, um DIDIM auszuführen.
- [3] Verschieben Sie die Kioske so, dass die Ränder der projizierten Bildschirme übereinstimmen.
- [4] Verbinden Sie die Kioske in den Einstellungen.




Für diese Funktion ist eine Internetverbindung erforderlich.

* Für eine stabile Verbindung empfehlen wir die Verwendung einer Kabelverbindung.


▶ **1.** Multi-Kiosk-Modus starten



▶ **2.** Haupt-/Unterkiosk auswählen

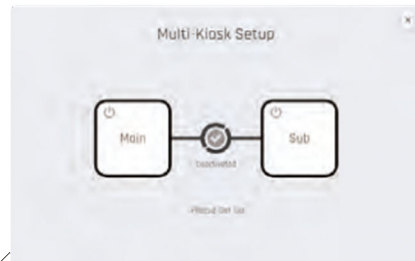


▶ **3.** Wählen Sie Haupt-/Nebenpositionen

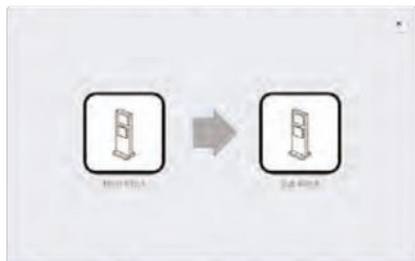

▶ **4.** Warten Sie auf die Verbindung der Kioske



▶ **5.** Seriennummer des Hauptkiosks eingeben

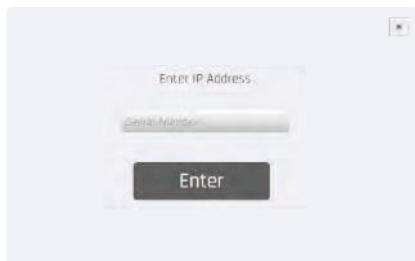

▶ **6.** Abschließen durch Drücken von Verbinden



18 HÄUFIG GEMELDETE PROBLEME

► FALSCHES ODER IGNORIERTES EINGABEN

► Bitte prüfen Sie, ob sich die LiDAR-Sensoren auf beiden Seiten drehen. <<

Ursache 1: Der Boden ist nicht eben oder der Kiosk ist schief

Lösung 1: Stellen Sie den Kiosk auf eine ebene Fläche, oder justieren Sie seine Position mit den Schrauben, die sich an der Bodenplatte und den Sensorarmen befinden.

Ursache 2: Die Bodenmatte ist zu dick, wahrscheinlich über 5 mm dick

Lösung 2-1: Erhöhen Sie den Kiosk mit den unteren Schrauben.

Lösung 2-2: Erhöhen Sie den Kiosk, indem Sie einen Gegenstand darunter legen.

► FALSCHES VIDEOAUSGABE VOM PROJEKTOR

Ursache 1: Der Projektor wurde nach dem Kiosk-PC eingeschaltet

Lösung 1: Schalten Sie den Kiosk-PC aus und schalten Sie ihn wieder ein, während der Projektor läuft.

Ursache 2: Der DIDIM-Client wurde nicht gestartet

Lösung 2: Starten Sie den DIDIM-Client manuell über den Desktop.

► LEISE ODER GERINGE LAUTSTÄRKE

Ursache 1: Die Lautstärke ist in den Einstellungen zu niedrig eingestellt

Lösung 1: Überprüfen Sie die Lautstärke im Einstellungsfenster des DIDIM.

Ursache 2: Das Ausgabegerät ist unter Windows falsch eingestellt

Lösung 2: Wechseln Sie zu Windows, öffnen Sie die Toneinstellungen unten rechts und ändern Sie das Wiedergabegerät.

► LANGSAMES HOCHFahren/HERUNTERFahren


Ursache: Kann sich aufgrund von Systemeinschränkungen länger anfühlen

Lösung: Dieser Vorgang dauert normalerweise bis zu 1 Minute. Bitte warten Sie geduldig.

VERSTEHEN DER SENSOREN


► WIE DIE SENSOREN AUF NEIGUNG REAGIEREN

Normal

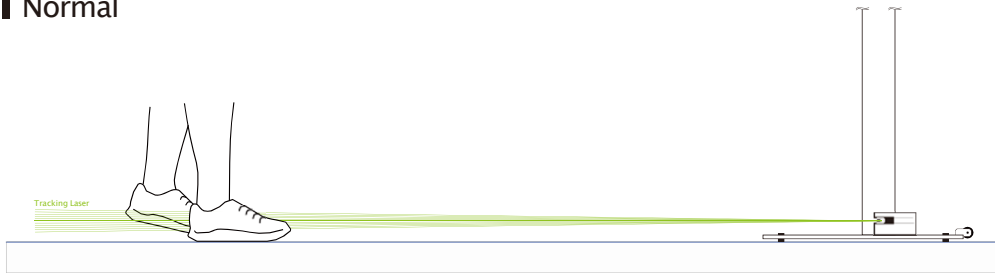


➡ Der Kiosk befindet sich in gleicher Höhe wie der Boden

Die Sensoren können die Bewegung der Füße nicht verfolgen

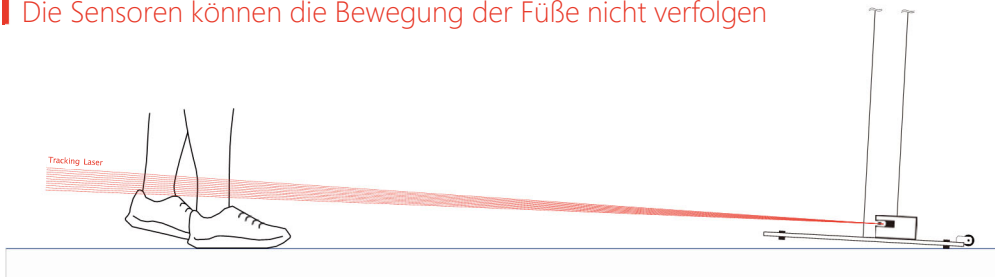

➡ Kiosk ist nach hinten geneigt

Sensoren reagieren auf einen leeren Raum

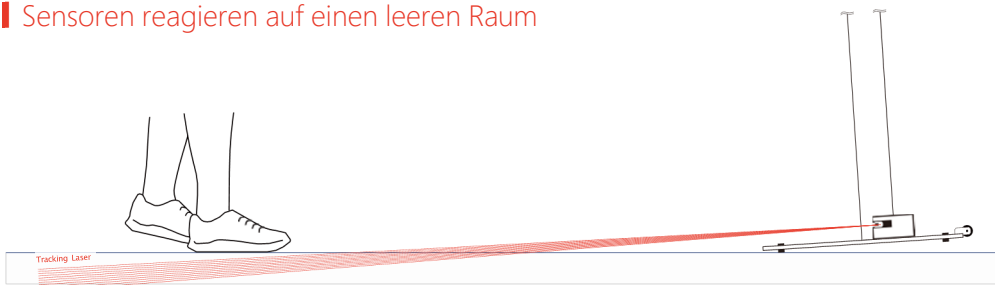

➡ Kiosk ist nach vorne geneigt

19 ONLINE SUPPORT


Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Störung oder ein Problem zu beheben, kann der Kiosk zur Fehlerbehebung per Fernzugriff mit dem Service-Center verbunden werden.

* Diese Funktion erfordert eine stabile Internetverbindung.



▶ 1. EXIT ZU WINDOWS


Auf dem Touchscreen kann durch Ziehen vom linken Rand nach rechts der Desktop verlassen werden.

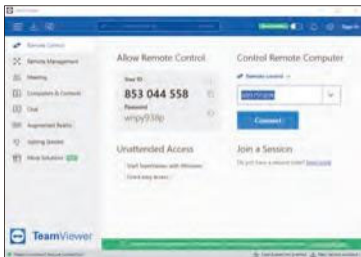

▶ 2. TEAMVIEWER STARTEN



Doppelklicken Sie auf das TeamViewer-Symbol, um es zu starten.

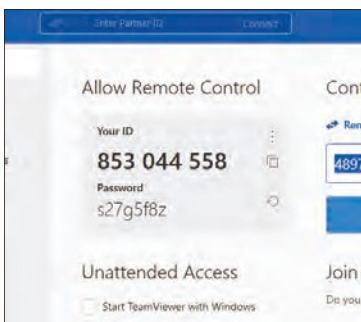


▶ 3. ID UND PASSWORT SENDEN

Machen Sie ein Foto des Bildschirms, auf dem die ID und das Kennwort angezeigt werden, und senden Sie es an den Kundendienstmitarbeiter.

Befolgen Sie die Anweisungen des Mitarbeiters.

20 SPEZIFIKATIONEN

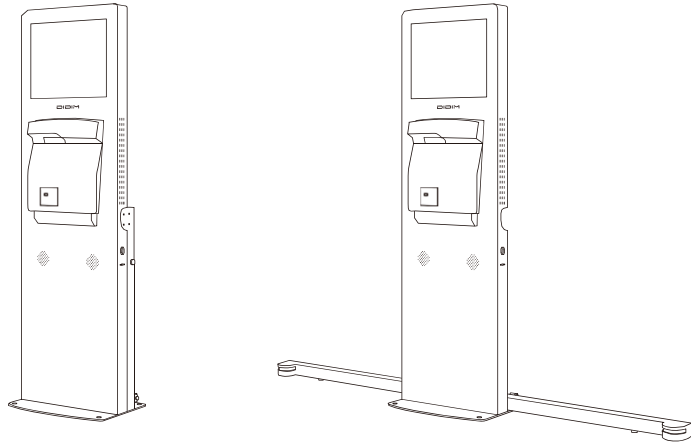

Artikel	Sensoren verstaut	Sensoren im Einsatz
Dimensionen (cm)	48(W) x 163(H) x 42(D)	201(W) x 163(H) x 42(D)
Gewicht	54kg	
Display Auflösung	Full-HD(1920x1080) / 4000lm(22,000:1)	
Display Maße	4.5m x 2.5m	
Netzwerk	1Gbps / 802.11ac Wireless / Bluetooth	
Strom	100V~220V / 60Hz	
Verbrauch	500W	

* Technische Daten und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



BROADCAST AND COMMUNICATION EQUIPMENT COMPLIANCE			
TRADE NAME	Twohands Interactive Co.	COUNTRY OF ORIGIN	Republic of Korea
DEVICE NAME	DIDIM KIOSK	YEAR OF MANUFACTURE	2024
MODEL	DIDIM-KA19PL	SERVICE CONTACT	051-784-1266
REGISTER	R-R-Two-DIDIM-K	WEBSITE	www.play-didim.com
MANUFACTURER	Twohands Interactive Co.	ADDRESS	Refer to back cover

