


Gebrauchsanleitung

Smart Pegboard

1. Komponentenübersicht

Im Folgenden finden Sie die Komponenten und das Zubehör Ihres Smart Pegboard.

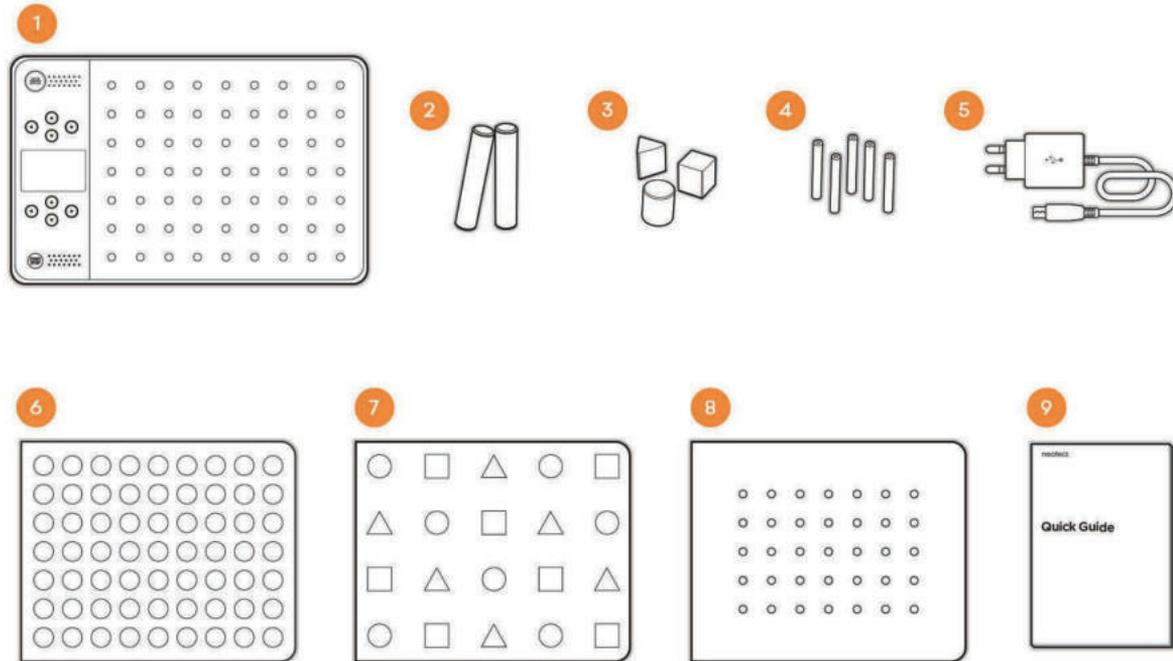

① Basiseinheit	X 1	Basiseinheit des Pegboards mit LED, LCD und Menü-Tasten
② Standard Pegs	X 63	Diese Pegs können für die Standard-Auflage genutzt werden.
③ Mixed Shape Pegs	X 20	Diese Pegs können für die Formen-Auflage genutzt werden.
④ Pinch Pegs	X 35	Diese Pegs können für die Pinch-Auflage genutzt werden.
⑤ Stromkabel	X 1	Benötigt für die Stromversorgung des Pegboards.
⑥ Standard Board	X 1	Auflage für die Basiseinheit
⑦ Mixed Shape Board	X 1	Auflage für die Basiseinheit
⑧ Pinch Board	X 1	Auflage für die Basiseinheit
⑨ Kurzanleitung	X 1	Zusammengefasste Kurzanleitung für die Nutzung des Pegboards.


- Ihr Exemplar des Ladekabels kann von der Abbildung abweichen.

2. Wie Sie das Smart Pegboard benutzen

① Wie Sie das Smart Pegboard AN und AUS schalten


- AN: Verbinden Sie das Stromkabel und drücken Sie die [START] Taste.
- AUS: Halten Sie die [STOP] Taste für 4 Sekunden gedrückt.
- Display schaltet sich nach 10 Minuten ohne Nutzung aus.
- Strom schaltet sich nach 1 Stunde ohne Nutzung aus.

* 6 Stunden Nutzung mit einer portablen Powerbank 1000mAh

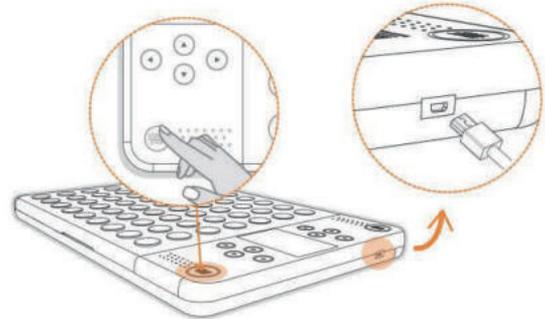

② Auflagen einsetzen



- Setzen Sie die Auflage auf die Basiseinheit
- Die Basiseinheit erkennt die entsprechende Auflage automatisch und fährt mit dem Training fort.

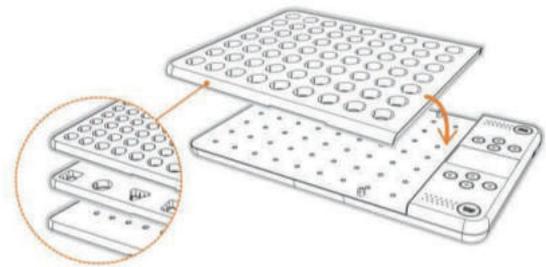

③ Einstellen der affektierten Seite

Einstellen der affektierten Seite über die [START] Taste

- Ändern Sie die Ausrichtung der Display-Ansicht und Bedienung je nach gedrückter [START] Taste.

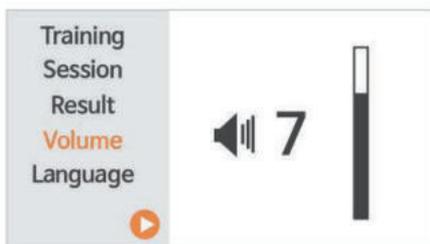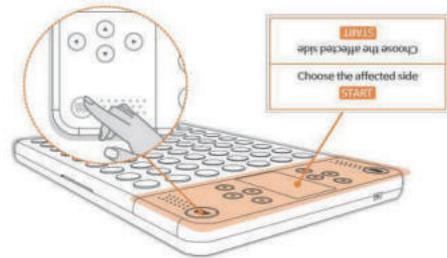

④ Einstellen der Lautstärke

Anpassung der Lautstärke je nach räumlicher Situation oder Bedürfnissen des Nutzers.

⑤ Einstellen der Sprache


Unter dem Menüpunkt "Sprache" können Sie die Anzeige- als auch Tonausgabe separat einstellen.

3. Art des Trainings

Es gibt verschiedene Trainingsarten, die Sie im Rahmen der Nutzung auswählen können.
- Die Art des Trainings kann variieren, je nachdem welche Auflage Sie benutzen.


Wie Sie wollen

Stecken Sie die Pegs dort ein, wo Sie möchten.

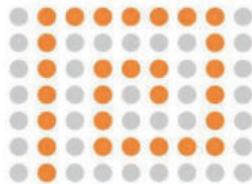

Reihen füllen

Stecken Sie die Pegs in die vorgegebenen Reihen.

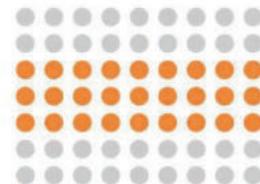


Toter Winkel 1

Stecken Sie die Pegs in die vorgegebenen Reihen.




Toter Winkel 2

Sie werden dazu aufgefordert, den Peg in die Mitte oder an das Ende zu stecken.

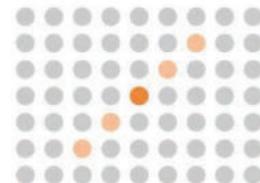

Malen nach Lichtern

Stecken Sie die Pegs so ein, dass diese die Form vervollständigen.

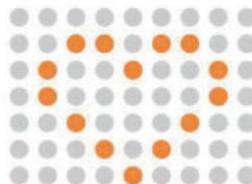

Formenerkennung

Verwenden Sie den Peg mit der richtigen Form.




Alle Vertiefungen füllen

Füllen Sie das gesamte Board mit Pegs aus.




Nach dem Zufall setzen

Stecken Sie die Pegs in die aufleuchtenden Löcher.

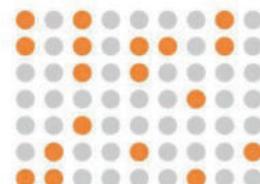


Fang den Maulwurf

Erwischen Sie den aufleuchtenden Maulwurf, bevor er wieder verschwindet!

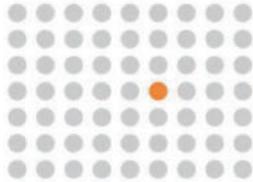


Schlange fangen

Fangen Sie den Körper der Schlangen mit einem Peg.

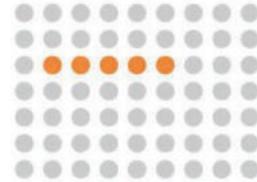


Gedächtnisspiel

Merken Sie sich die aufleuchtenden Löcher und stecken Sie anschließend die Pegs hinein.

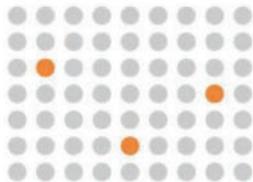

Ich packe meine Koffer 1

Merken Sie sich die Reihenfolge und stecken Sie die Pegs entsprechend nacheinander ein.

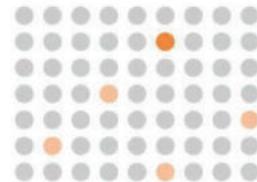

Ich packe meine Koffer 2

Merken Sie sich die Reihenfolge und stecken Sie die Pegs in umgekehrter Reihenfolge ein.




Lichterkette

Verbinden Sie die drei Lichter, um eine Kette zu bilden.



Umleitung

Leiten Sie durch das Stecken der Pegs das blinkende Licht zum Ziel.

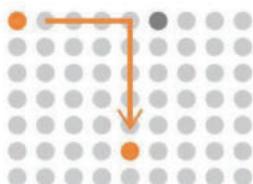


4. Training starten

Mithilfe der folgenden Schritte können Sie eine Trainingsart auswählen.

① Training

Wählen Sie <Training> .

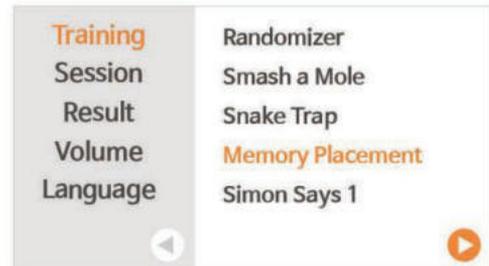

② Detailauswahl

Wählen Sie das gewünschte Level.




③ Optionen

Sie können das Zeitlimit, die Hinweiszeit und die Geschwindigkeit der Lichter steuern.



④ Erklärungen

Nachdem Sie die Erklärung zum Training gelesen haben, drücken Sie auf [START] oder [▶] um zu beginnen.

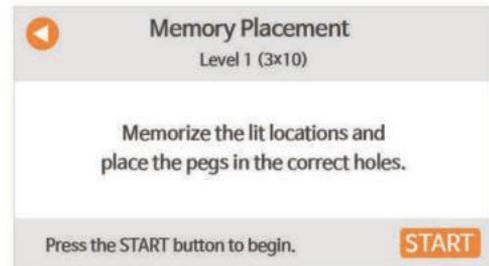

⑤ Trainingsinformationen

- Wenn Sie das Training starten, wird die Übung für Sie angesagt.
- Während des Trainings können Sie Ihren Fortschritt in Echtzeit auf dem Display verfolgen.
- Wenn Sie [◀] drücken, wird die Übungsansage wiederholt.
- Durch Drücken auf [▶] erhalten Sie einen Hinweis.



⑥ Pause

Drücken Sie während des Trainings die [STOP] Taste, um zu pausieren und [START], um fortzufahren.



⑦ Ergebnisse

- Sie können Ihre Ergebnisse entweder nach Abschluss des Trainings oder durch Drücken der [STOP] Taste und dem Abbrechen des Trainings sehen.
- Sie können die Ergebnisse Ihrer letzten Trainingseinheiten im Menü unter <Ergebnisse> überprüfen.
 - Hier sehen Sie Ihre neuesten Ergebnisse.
 - Sie können auch die älteren Ergebnisse überprüfen, indem Sie die Seiten umblättern.



5. Sessionen

Durch das Sessionen-Training können Sie verschiedene Arten von Training hintereinander durchführen, ohne Tasten zu drücken.

① Sessionen-Training

Drücken Sie die [START] Taste, um die Trainingsarten in einer bevorzugten Reihenfolge zu starten.



② Detailauswahl

Das Training erfolgt in der auserwählten Reihenfolge.



③ Ergebnisse

Nach 15 Sekunden wird der Bildschirm mit den Trainingsergebnissen automatisch angezeigt und Sie fahren mit der nächsten Trainingseinheit fort.



6. Ordnungsgemäße Lagerung und Verwendung

Kategorie	Beschreibung
Temperatur / Lagertemperatur	0 ~ 35 (°C) / -20 ~ 70 (°C)
Luftfeuchtigkeit & Lagerfeuchtigkeit	15 ~ 90 (%)
Zeit der durchgängigen Nutzung	8 Std.

7. Detaillierte Gerätespezifikation

Kategorie	Beschreibung
Gerätename	Neofect Smart Pegboard
Modelname	PB
Ziele	Manuelle Geschicklichkeit / Visuell-motorische Integration / Visuelle Erkennung und Formerkennung
Maße	557(W) x 353(H) x 32(D) mm
Gewicht	6.32kg
Sensor	Lochsensor (magnetische Erkennung) Erkennungsbereich: 7mm
LED	Typ: Hohe Beleuchtungsstärke, 5V LED
LCD	4.3'' TFT-LCD
Lautsprecher	Eingebauter Lautsprecher für akustisches Feedback Power 1.2W
Ladetyp	Micro USB 5pin

8. Kontakt

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den angegebenen Händler.

NEOFECT Co., Ltd

Homepage www.neofect.com

E-Mail rapael@neofect.com

Tel +82-31-889-8521

Fax +82-31-759-7722

Adresse: 801, Business growth support center, 54, Changeop-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13449, Korea

NEOFECT U.S.A. Office

Homepage www.neofect.com

E-Mail info@neofect.com

Tel +1-888-623-8984

Fax +1-804-267-1612

Adresse: 530 Howard St #100 San Francisco, CA 94105

NEOFECT Europe Office

Homepage www.neofect.de

E-Mail info@neofect.de

Tel +49-89-5908-1302

Fax +49-89-5908-1200

Adresse: Marcel-Breuer-Str. 15, 80807 Munich, Germany

9. Informationen Kurzanleitung

Kategorie	Beschreibung
Dokument-Nr.	IFU-RSP_C
Version	V 1.0.0
Datum	25. März 2020

10. Zertifikat



기기의 명칭 : Neofect Smart Pegboard
모델명 : PB
인증번호 : MSIP-REM-NeO-PB-01
인증받은 자의 상호 : NEOFECT
제조사/제조국 : NEOFECT Co., Ltd. /
한국 제조년월 : 2017. 08



Product : Neofect Smart Pegboard
Modell : PB
Eingang: 5V --- 1.5A
Ausgang: -
Hersteller: NEOFECT Co., Ltd.
Herstellungsland: Korea



Produkt: Neofect Smart Pegboard
Modell: PB
Eingang: 5V --- 1.5A
Ausgang: -
Hersteller: NEOFECT Co., Ltd.



Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

© Neofect. Alle Rechte vorbehalten

www.neofect.de
info@neofect.de